

CRYOTHERM VARI WRAP

Vielseitig verwendbare cryothermische Bandage

Diese Bandage kann an verschiedenen Körperteilen zur Kompression, Kühlung und Wärmung angelegt werden.

Mögliche Indikationen:

- nach einer OP
- bei Arthritis
- Zerrungen / Verstauchungen
- zur Unterstützung bei der REHA

- aus weichem, atmungsaktiven laminierten Schaumstoff; ausgestattet mit Klettverschlüssen und einer Tasche für wieder verwendbare Kühlkompressen

Artikelnummern	
ohne Kühlkompressen	72-7070
mit 1 Kühlkomresse	72-7071
mit 2 Kühlkompressen	72-7072

Bandagenumfang bis 102 cm

zusätzliche Kühlkompressen (Maße: 14 cm x 28 cm) **erhältlich:**

1 Stk	72-7001
10er Pkg	72-7000

Gebrauchsanweisung:

1. Beachten Sie die Gebrauchsanweisung für die Anwendung der Kühlkompressen.
2. Verwenden Sie pro Anwendung nur eine Kühlkomresse und schließen Sie die Tasche richtig.
3. Die Bandage besteht aus zwei Teilen, die einzeln oder zusammen verwendet werden können.
4. Legen Sie die Bandage am betroffenen Körperteil so an, dass sie bequem sitzt.

Pflege und Reinigung:

Corflex stellt hochwertige Produkte her. Damit Sie lange Freude daran haben, beachten Sie bitte folgende Pflegehinweise:

Schließen Sie alle Verschlüsse und waschen Sie die Bandage mit milder Seife von Hand in warmem Wasser. Die Bandage sollte an der Luft trocknen. Verwenden Sie weder zum Waschen noch zur Trocknung hohe Temperaturen.

Bestellung unter info@top-medical.org