

KNEE SLEEVE W/ANTERIOR PAD

Kniebandage mit zusätzlichem Polster an der Vorderseite

Diese Bandage stützt das Knie, wärmt und sorgt für Kompression mit einem extra Polster über der Kniescheibe für zusätzlichen Schutz.

Mögliche Indikationen:

- Leichtere Kniezerrungen/-stauchungen
- Knieverletzungen
- Arthritis / Arthrose

- aus hochwertigem latexfreien Neopren

Artikelnummern

33 cm Länge	
XS	88-0172
S	88-0173
M	88-0174
L	88-0175
XL	88-0176
2XL	88-0177

auch in Größe 3XL und 4XL erhältlich

Maßtabelle

	15 cm über der Kniescheibenmitte	Kniescheibenmitte	15 cm unter der Kniescheibenmitte
XS	40 – 46 cm	30 – 33 cm	28 – 30 cm
S	43 – 48 cm	33 – 35 cm	30 – 33 cm
M	46 – 51 cm	35 – 38 cm	33 – 35 cm
L	48 – 53 cm	38 – 40 cm	35 – 38 cm
XL	51 – 56 cm	40 – 46 cm	38 – 40 cm
2XL	53 – 58 cm	46 – 51 cm	40 – 43 cm
3XL	61 – 66 cm	51 – 56 cm	43 – 45 cm
4XL	68 – 73 cm	56 – 61 cm	45 – 48 cm

Die Hinweise und Informationen auf diesen Seiten sind nicht als Ersatz für ärztlichen Rat gedacht. Sollten Sie Fragen bezüglich der Behandlung eines spezifischen Zustands haben, fragen Sie bitte einen Arzt.

top-medical UG (haftungsbeschränkt) · Pücklerstr. 37 · 14195 Berlin · www.top-medical.de

Gebrauchsanweisung:

1. Mit der schwarzen Seite der Bandage nach außen, mit dem Fuß in die größeren Öffnung schlüpfen und über das Knie ziehen.
2. Die Naht sollte sich an der Rückseite des Beins befinden.
3. Ihre Kniescheibe sollte in der einen Öffnung der Bandage zentriert sein.
4. Richten Sie die Bandage nach Bedarf aus.

Pflege und Reinigung:

Corflex stellt hochwertige Produkte her. Damit Sie lange Freude daran haben, beachten Sie bitte folgende Pflegehinweise:

Schließen Sie alle Verschlüsse und waschen Sie die Bandage mit milder Seife von Hand in warmem Wasser. Die Bandage sollte an der Luft trocknen. Verwenden Sie weder zum Waschen noch zur Trocknung hohe Temperaturen.

Bestellung unter info@top-medical.org