

TARGET TENNIS ELBOW SLEEVE W/PAD
Gepolsterte Tennisarmbandage

Das Neoprenpolster mit Wickelgurt sorgt für zusätzliche Kompression der betroffenen Sehnen.

Mögliche Indikationen:

- Golferellenbogen
- Tennisellenbogen

- aus hochwertigem latexfreien Neopren

Artikelnummern

S	88-3033
M	88-3034
L	88-3035
XL	88-3036
2XL	88-3037

Maßtabelle

S	20 – 23 cm
M	23 – 25 cm
L	25 – 28 cm
XL	28 – 30 cm
2XL	30– 35 cm

Maße beziehen sich auf die breiteste Stelle des Unterarms

Gebrauchsanweisung:

1. Bei offenem Gurt die Bandage über den Unterarm schieben.
2. Stellen Sie sicher, dass sich die Bandage über der betroffenen Stelle des Unterarms befindet.
3. Fädeln Sie den Gurt durch die Schnalle, ziehen ihn an und fixieren ihn mit dem Klettverschluss.
4. Regulieren Sie die Weite, so dass die Bandage bequem anliegt.

Pflege und Reinigung:

Corflex stellt hochwertige Produkte her. Damit Sie lange Freude daran haben, beachten Sie bitte folgende Pflegehinweise:

Entfernen Sie zur Reinigung sämtliche Streben soweit möglich, schließen Sie alle Verschlüsse und waschen Sie die Bandage mit milder Seife von Hand in warmem Wasser. Die Bandage sollte an der Luft trocknen. Verwenden Sie weder zum Waschen noch zur Trocknung hohe Temperaturen.

Bestellung unter info@top-medical.org